

clariti® 1 day multifocal 3 Add met het CooperVision Binocular Progressive System®

Aanpashandleiding

Gebruik deze aanpashandleiding voor maximaal succes.

- Nu met het CooperVision Binocular Progressive System®
- Voor verbeterd zicht en uitstekend draagcomfort.^{†1-3}
- 100% succesvolle aanpassing binnen maximaal twee paar paslenzen.⁴

Let op: Voor de eerste lenskeuze start altijd met het nieuwste brilrecept.

Eerste lenskeuze

Stap 1 Bepaal het nieuwe brilrecept.

Stap 2 Bepaal de oogdominantie met een blur suppressie test (+1.00 dpt of +1.50 dpt).

Stap 3 Bepaal de eerste lenskeuze aan de hand van onderstaande tabel.

EERSTE LENSKEUZE		
Additie	Dominante oog	Niet-dominante oog
+0.75 dpt t/m +1.25 dpt	LOW	LOW
+1.50 dpt t/m +1.75 dpt	LOW	MED
+2.00 dpt t/m +2.50 dpt	LOW	HIGH

Beoordeling van het zicht

→ Laat de lenzen +/- 10 minuten dragen voordat het zicht wordt beoordeeld - bij voorkeur buiten de aanpasruimte.

→ Controleer het zicht met beide ogen open en de verlichting aan.

- Beoordeel **het zicht op afstand** in de omgeving onder normale lichtomstandigheden.
- Beoordeel **het zicht dichtbij** met behulp van een telefoon of leesmateriaal.

→ Indien het zicht acceptabel is, kunt u de lenzen meegeven.

→ Als het zicht niet acceptabel is, volgt u de stap hiernaast voor lensoptimalisatie.

Lensoptimalisatie




Laat de klant beide ogen openhouden en optimaliseer het zicht met behulp van pasglazen of een flipper.

VERANDER NOOIT DE STERKTE VAN DE ADDITIE.

OPTIMALISEREN VAN HET ZICHT VERAF	
	Voor het dominante oog
Optimalisatie	±0.25 dpt
OPTIMALISEREN VAN HET ZICHT NABIJ	
	Voor het niet-dominante oog
Optimalisatie	±0.25 dpt

* clariti® 1 day multifocal with Binocular Progressive System™ availability is subject to CE approval. † Distance logMAR VA -0.05 vs -0.02 ($p < 0.01$), near VA 0.06 vs 0.11 ($p = 0.02$) for BPS vs 2 Add respectively. 1. CVI data on file, 2024. CVI data on file, 2022. Prospective, crossover, bilateral, subject masked, daily wear, dispensing study (4 clinical sites in U.S.) (n=58 habitual soft MFCL wearers). 2. CVI data on file 2021. Prospective, double-masked, bilateral, one-week dispensing study with clariti® 1 day multifocal 3 add with a rating of 88 out of 100; n=90 habitual MFCL wearers. 3. CVI data on file 2021. Prospective, double-masked, bilateral, one-week dispensing study with clariti® 1 day multifocal 3 add; with a rating of 93 out of 100; n=90 habitual MFCL wearers. 4. CVI data on file 2021. Prospective, double-masked, bilateral, one-week dispensing study with clariti® 1 day multifocal 3 add; n=90 habitual MFCL wearers.

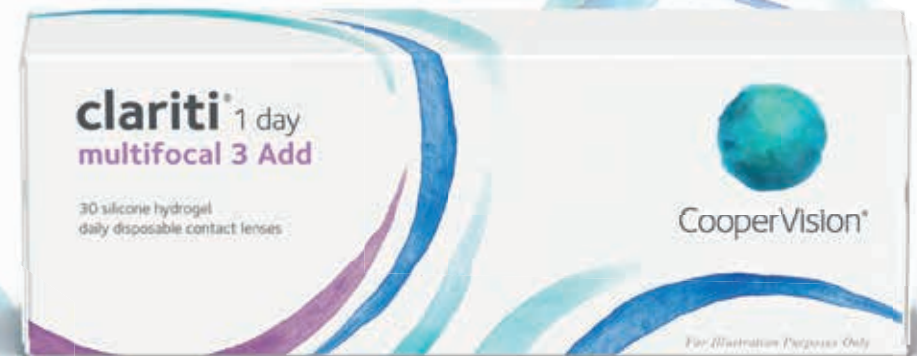

clariti® 1 day multifocal 3 Add met het CooperVision Binocular Progressive System®

Aanpashandleiding

Download OptiExpert™ uit de App Store of Google Play, of ga naar: www.coopervision.nl/contactlensspecialist/optiexpert of voor België: www.coopervision.be/nl/practitioner/optiexpert



Productspecificaties

clariti® 1 day multifocal 3 Add

Basiscurve	8.6 mm
Diameter	14.1 mm
Sterktebereik	+8.00 dpt tot -10.00 dpt (stappen van 0.25 dpt) -10.50 dpt tot -12.00 dpt (stappen van 0.50 dpt)
Additie	LOW +0.75 dpt tot +1.25 dpt MED +1.50 dpt tot +1.75 dpt HIGH +2.00 dpt tot +2.50 dpt
Materiaal	somofilcon A
Dk/t (bij -3.00 Dpt)	86 x 10 ⁻⁹
Middendikte	0.07mm
UV filter*	Klasse 2

*Waarschuwing: UV-absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals UV-absorberende veiligheidsbrillen of zonnebrillen, omdat ze het oog en het omliggende gebied niet volledig bedekken. Klanten moeten UV-absorberende brillen blijven gebruiken zoals voorgeschreven. 1. CVI-Data on file, 2024

©2025 CooperVision 06/25

Aanpastips




- Voor optimaal zicht met beide ogen kiest u de maximale plussterkte en vermijdt u te veel min sterkte.
- Gebruik losse pasglazen of een flipper voor optimalisatie. Gebruik geen phoropter.
- Als het zicht op afstand moet worden verbeterd, bied dan ± 0.25 dpt aan voor het dominante oog. Als het zicht op afstand verbetert, controleer dan of het zicht voor nabij acceptabel is. Pas de sferische sterkte van het dominante oog aan. **WIJZIG DE ADD STERKTE NIET.**
- Als het zicht voor nabij moet worden verbeterd, bied dan ± 0.25 dpt aan voor het niet-dominante oog. Als het zicht nabij verbetert, controleer dan of het zicht in de verte acceptabel blijft. Pas de sterkte van de lens aan voor het niet-dominante oog. **WIJZIG DE ADD STERKTE NIET.**

CooperVision Binocular Progressive System®

Het Binocular Progressive System™ is ontworpen om presbyopen een zichtervaring te geven zoals ze die vroeger hadden. Het biedt optimale gezichtsscherpte op alle afstanden², zelfs wanneer hun brilsterkte en visuele behoeften veranderen.


Low Add

Asferisch centre-near ontwerp

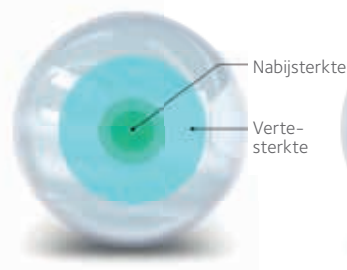


Medium Add

Asferisch centre-near ontwerp

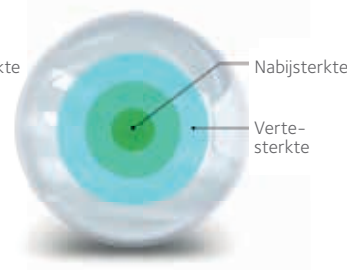

High Add

Sferisch centre-near ontwerp, met dubbele tussenliggende zones

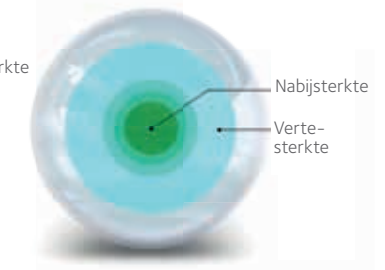

Alleen ter illustratie



CooperVision®