

MyDay® multifocal daglenzen aanpashandleiding

Met het CooperVision® Binocular Progressive System™



Download OptiExpert™ van de
App Store of Google Play, of via:
[www.coopervision.nl/contactlensspecialist/
optiexpert/optiexpert-web](http://www.coopervision.nl/contactlensspecialist/optiexpert/optiexpert-web)



Eerste lens keuze

Stap 1 Gebruik een up-to-date bril refractie, bepaal de verte sterkte; sferisch equivalent (gecorrigeerd voor vertexafstand)

Stap 2 Bepaal het dominante oog (verte) met de blur suppressie test (+1.00dpt)

Stap 3 Selecteer de sferische vertesterkte per oog en kies de additie zoals hieronder aangegeven.

Of gebruik OptiExpert®, zie link bovenin en stappenplan op de achterzijde.

EERSTE LENS KEUZE		
Gemeten additie	Dominante oog	Niet dominante oog
+0.75dpt t/m +1.25dpt	LOW	LOW
+1.50dpt t/m +1.75dpt	LOW	MED
+2.00dpt t/m +2.50dpt	LOW	HIGH

Beoordeling van het zicht

- Laat voor het beste resultaat de drager 10-15 minuten het zicht buiten de meetruimte ervaren.
- Controleer het zicht met beide ogen open en de verlichting aan:

- **Vertezicht**, beoordelen in een omgeving onder normale lichtomstandigheden.
- **Nabijzicht**, beoordelen met behulp van mobiele telefoon of ander leesmateriaal.

- Indien acceptabel, paslenzen meegeven.
- Als dit niet acceptabel is, volgt u de stappen voor lensoptimalisatie.

Lensoptimalisatie



Laat de klant beide ogen open houden en gebruik losse pasglazen of een flipper; **GEBRUIK GEEN PHOROPTER.**

VERANDER NIET DE ADDITIE.

VERBETERING VERTEZICHT	
	Voor het dominante oog
In stappen van	±0.25dpt

VERBETERING NABIJZICHT	
	Voor het niet dominante oog
In stappen van	±0.25dpt

¹ CVI data on file 2020. Prospective, double-masked, bilateral, one-week dispensing study UK with MyDay® daily disposable multifocal; n=104 habitual multifocal contact lens wearers; CVI data on file 2021. Prospective, subject-masked, randomized, bilateral, two-week dispensing study at 5 US sites with MyDay® daily disposable multifocal; n=58 habitual multifocal contact lens wearers.

MyDay® multifocal daglenzen aanpashandleiding



Ondersteund door OptiExpert®

Stap 1 vul de sterkte van het rechteroog in

Stap 2 vul de vertexafstand (BVD), additie en het dominante oog in

Stap 3 vul de sterkte van het linkeroog in

Stap 4 druk op 'berekenen'

Productspecificaties

MyDay® multifocal daglenzen

Basiscurve	8.4 mm
Diameter	14.2 mm
Sterktebereik	+8.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.25dpt) -10.50dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt)
Additie	Low (+0.75dpt t/m +1.25dpt) Med (+1.50dpt t/m +1.75dpt) High (+2.00dpt t/m +2.50dpt)
Materiaal	stenfilcon A
Dk/t (@ -3.00dpt)	100
Middendikte	0.08mm
UV-filter*	85% UVA/96% UVB

*Waarschuwing: UV- absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende UV- absorberende materialen, zoals zonnebrillen, omdat ze niet het volledige oog en de directe omgeving bedekken. Consumenten moeten UV- absorberende materialen blijven gebruiken.

©2021 CooperVision 02/21

Belangrijke tips




- Schrijf de maximale plus sterkte voor, voor het binoculaire vertezicht; geef niet te veel min sterkte.
- Gebruik losse pasglazen of een flipper, **GEBRUIK GEEN PHOROPTER.**
 - Als het vertezicht moet worden verbeterd, bied dan $\pm 0,25$ dpt aan het dominante oog. Geeft dit verbetering, en blijft het nabijzicht gelijk? Pas dan de sferische sterkte aan voor het dominante oog. **VERANDER NIET DE ADDITIE.**
 - Als het nabijzicht moet worden verbeterd, bied dan $\pm 0,25$ dpt aan het niet-dominante oog. Geeft dit verbetering, en blijft het vertezicht gelijk? Pas dan de sferische sterkte aan voor het niet-dominante oog. **VERANDER NIET DE ADDITIE.**
- Gebruik OptiExpert® om altijd de juiste paslens te kiezen.

CooperVision® Binocular Progressive System™

Het **Binocular Progressive System™** is ontworpen om presbyopen te helpen om het gezichtsvermogen dat zij ooit hadden, terug te vinden. Het biedt presbyopen een optimale gezichtsscherpte op alle afstanden¹, zelfs als hun voorschrift en zichtbehoeften veranderen.

Low Add

Asferisch centrum-nabij design.

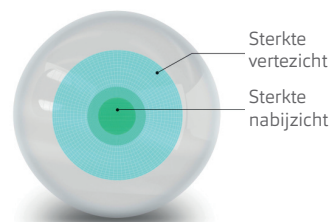


Sterkte
vertezicht

Sterkte
nabijzicht

Medium Add

Asferisch centrum-nabij design.

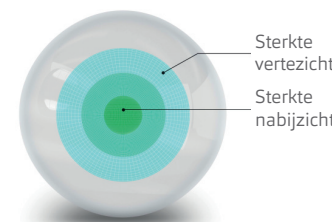


Sterkte
vertezicht

Sterkte
nabijzicht

High Add

Sferisch centrum-nabij design,
met dubbele tussenzone.

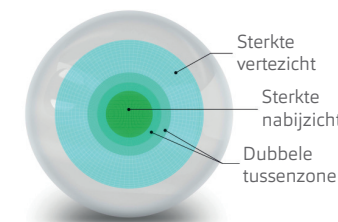

Sterkte
vertezicht

Sterkte
nabijzicht

Dubbele
tussenzone

Enkel ter illustratie